

- FLUORECARE Reader
- 80 µl Pipette
- 10 µl Pipette/Kapillare
- Pipettenspitzen
- Stoppuhr

1 x CRP Test Kit enthält:




Lagerung Testkassetten & Diluent bei 2°C - 30°C



1 Die Lotnummer auf dem ID-Chip und der Testkassette müssen identisch sein.




2 Puffer und Testkassette auf Raumtemperatur (20°C - 25°C) bringen. Den Reader einschalten und die Taste TEST drücken.

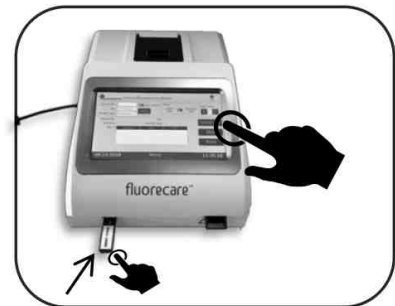


3 ID-Chip in den Reader einsetzen und Taste READ ID CARD drücken.



4 10 µl Serum, Plasma oder Vollblut in den temperierten (20°C - 25°C) Diluent pipettieren. Ausreichend und sorgfältig vermischen!

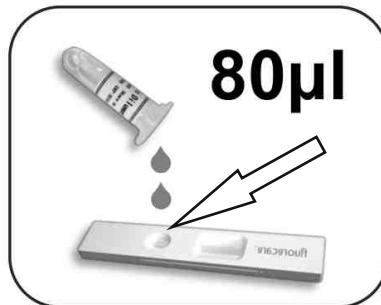

5 80 µl Proben-Diluentgemisch in die Probenöffnung der CRP Testkassette pipettieren.

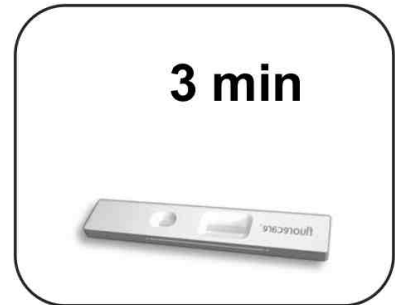

6 Lassen Sie die Testkassette bei Raumtemperatur (20°C - 25°C) **3 Minuten ruhen**.



7 Die Testkassette in den Reader geben und die Taste TEST drücken. Das Messergebnis erscheint auf dem Display und wird durch drücken der Taste PRINT ausgedruckt.

ACHTUNG

- Die Testkassette und den Diluent vor dem Test auf Raumtemperatur (20°C - 25°C) erwärmen.
- Nach Öffnung der versiegelten Verpackung der Testkassette, muss die Messung innerhalb 1 Stunde durchgeführt werden.